


Select Switch

Un interruptor de control impulsado por pilas para aparatos y juguetes impulsados por pilas

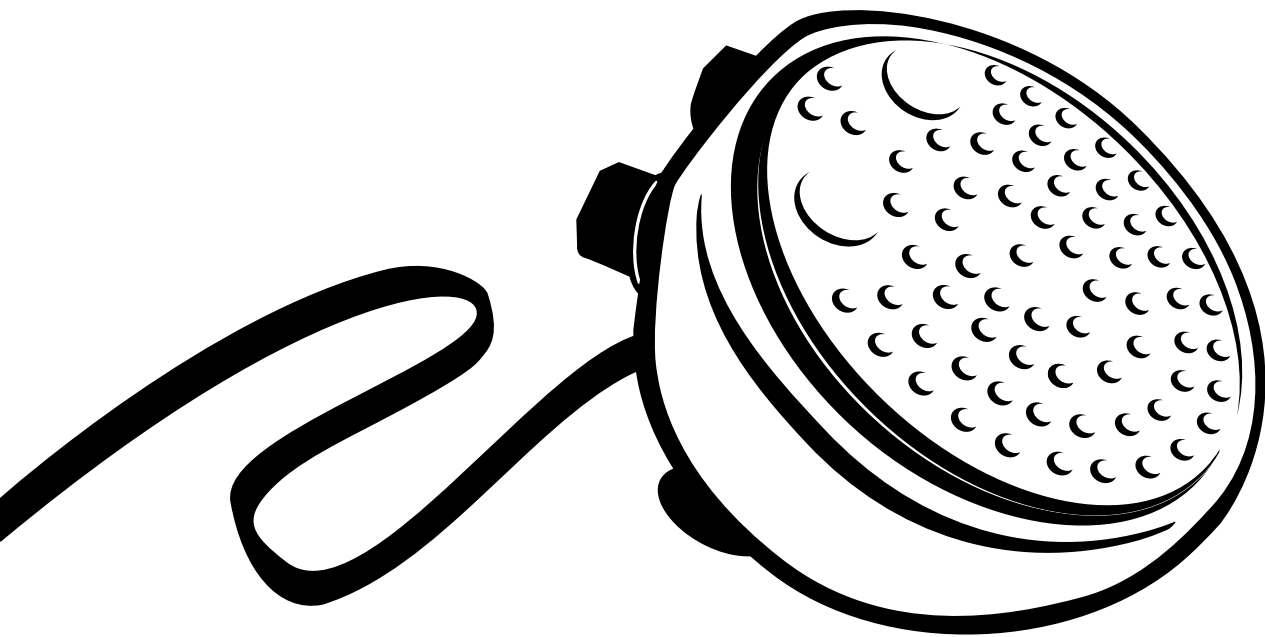

American Printing House for the Blind (APH)


Empoderando a las personas ciegas o con baja visión proporcionando productos, materiales y servicios accesibles e innovadores para el éxito de por vida.

Select Switch

El Select Switch es un interruptor impulsado por pilas que tiene función de control que permite los individuos a comunicar y controlar sus aparatos, juguetes y dispositivos. El interruptor se diseñó por APH para usar en aplicaciones de enseñanza y en prácticas cotidianas.

Introducción

El Select Switch permite la operación de interruptores de aparatos impulsados por pilas. El Select Switch tiene funciones que ayudan a las personas que tienen discapacidades motrices y deficiencias cognitivas.

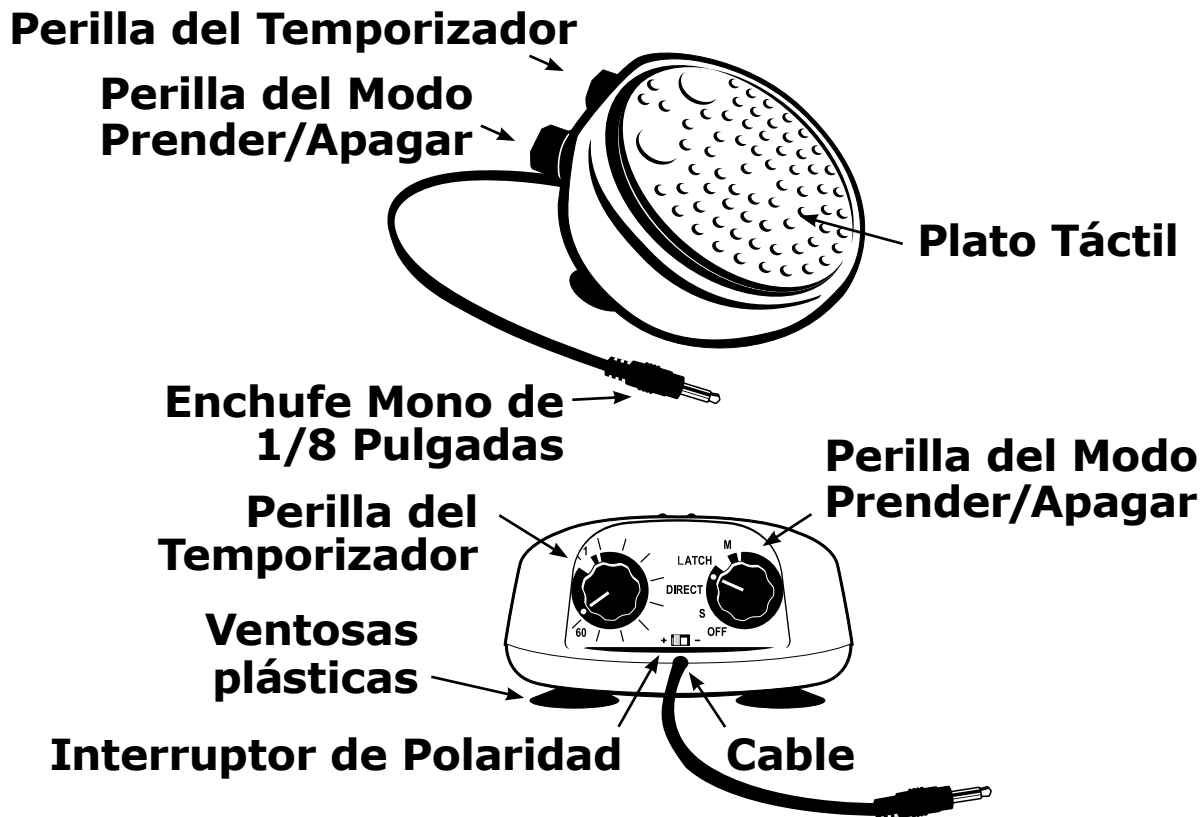

Características

- Interruptor de polaridad
- Enchufe mono de 1/8 pulgadas (3.5 mm) (Se puede usar adaptadores.)
- Cuatro modos de control para satisfacer las necesidades del usuario
- Un perfil bajo que se inclina para permitir accesibilidad fácil
- Una chapa lisa para adaptador de alternativos táctiles
- Soportes de ventosa que proveen estabilidad
- Le controla a los aparatos de voltaje nominal de 3-12VCC con consumo de corriente máximo de 1.5^a

Modo de Control

El Select Switch provee cuatro tipos de control de sus aparatos: el modo Directo, el modo de Segundos Temporizados, el modo de Minutos Temporizados, y el modo Cierre. Antes de usar el Select Switch y antes de escoger un Modo de Control, el que lo use por primera vez debe de consultar a un profesional que le pueda evaluar las habilidades y limites del usuario. Considere todas las deficiencias e incapacidades y examine las metas del usuario.


Directo

El modo Directo mantiene prendido al aparato solo cuando el interruptor esté activado (oprimido). Muchos usuarios nuevos prefieren usarlo de este modo. Por ejemplo, un usuario goza la brisa creada por su ventilador en la bandeja de su silla de ruedas. Ella aprende que puede controlarle al ventilador y la brisa por mantener el interruptor oprimido.

Para usarlo, gire la perilla a la posición **Directo (Direct)**. La perilla temporizada no se usa en este modo. El aparato solo se prenderá cuando el interruptor esté activado (oprimido) y se apagará cuando se suelta el interruptor.

Segundos Temporizados


El modo de Segundos Temporizados le permite al aparato que funcione por una cantidad predeterminada de tiempo, de 1 hasta 60 segundos, con una sola activación. Por ejemplo, configure un juguete que hace ruidos como un gallo por una cantidad de segundos. Cuando se detiene, observe que el usuario le señale activar el interruptor de nuevo. Enseñe al usuario que active el interruptor. Este modo también se puede usar para enseñar habilidades profesionales y cotidianas como cortando papeles con tijeras adaptadas e impulsadas con pilas.

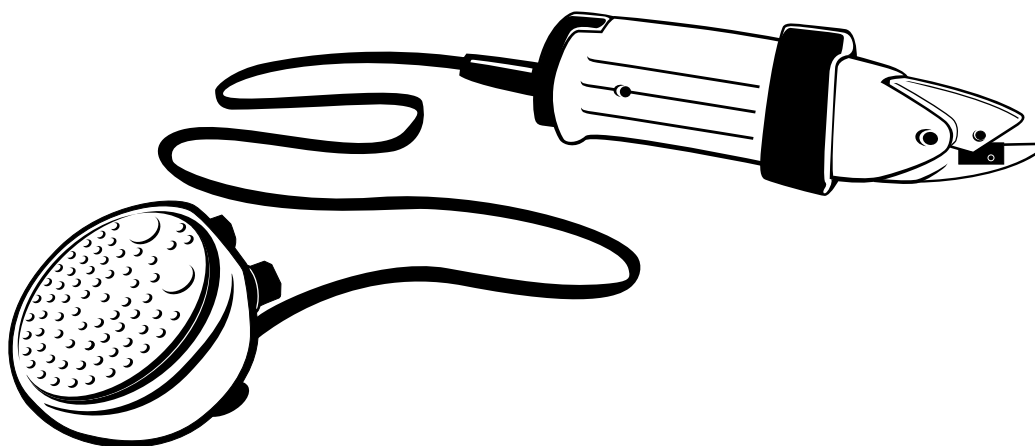

Para seleccionar, gire la perilla hacia la posición de modo **Segundos Temporizados (S)**, y la perilla del temporizador hacia la cantidad de segundos que usted quiere que el aparato se mantenga prendido. Cuando se acaban los segundos, el Select Switch le apagará al aparato automáticamente, aunque el usuario sigue oprimiéndole al interruptor.

Minutos Temporizados

El modo de Minutos Temporizados le permite al aparato que funcione por una cantidad predeterminada de tiempo, de 1 hasta 60 minutos, con una sola activación. Este modo se usa para rutinas auto-activadas que toman más tiempo. Por ejemplo, cuando se usa un aparato de masajes que se impulsa por pilas, una placa que vibra que es impulsado por pilas, o una maquina que hace burbujas que se impulsa por pilas.

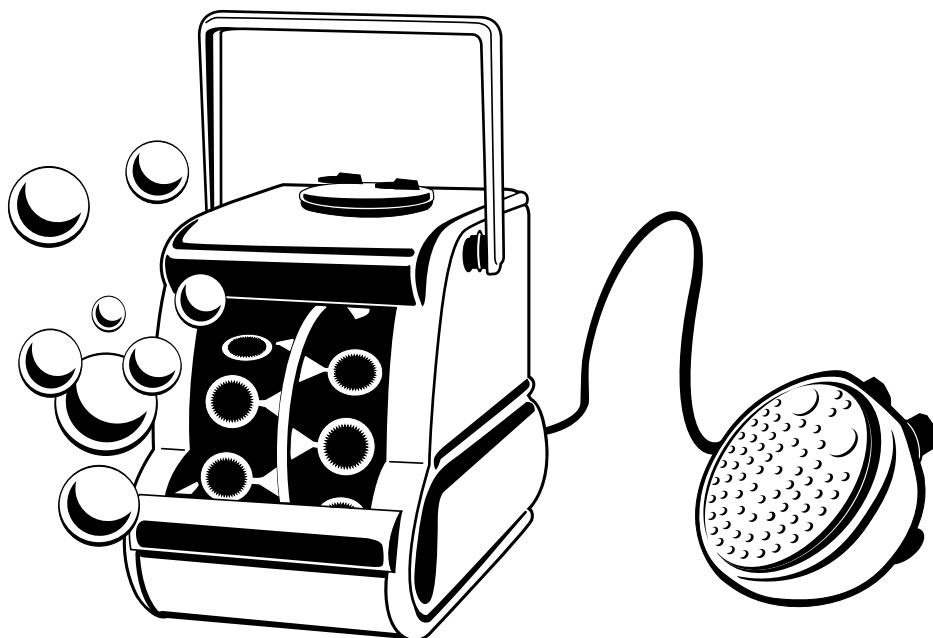

Para usar, gire la perilla de modo hacia la posición de **Minutos Temporizados (M)**, y la perilla del temporizador hacia la cantidad de minutos que usted quiere que el aparato se mantenga prendido. Cuando se acaban los minutos, el Select Switch apagará el aparato automáticamente, aunque el usuario sigue oprimiendo el interruptor.

Si no quiere esperar que el tiempo predeterminado se acabe, gire la perilla de Modo a cualquier otro Modo de Control y el aparato se apagará.

Cierre

La primera vez que usted active el interruptor SE PRENDE el aparato; la segunda vez, SE APAGA. El modo de Cierre se puede usar cuando una persona quiere escuchar reproductor de música en un tocador de discos compactos impulsado por pilas por una cantidad más larga de tiempo.



Para usar, gire la perilla inferior a la posición de **Cierre**. La perilla del temporizador no se usa en este modo. El aparato se prenderá cuando se activa el interruptor, y se apagará cuando se activa otra vez.

Instalando

1. Introduzca las pilas requeridas en el Select Switch y en el aparato, juguete o dispositivo también.
2. Introduzca el enchufe mono en el punto de conexión de recepción del aparato, juguete, o dispositivo.
3. Prenda el aparato o oprima donde indica ON (prender) o PLAY (tocar). Para un aparato que tiene un control de prender/apagar que es sensible a la presión, como un molinillo de café, oprima y mantenga el control oprimido con cinta para que se quede prendido.
4. Seleccione un Modo de Control en su Interruptor Selecto.
5. Active el interruptor.
6. Cuando usted termine, siempre gire la perilla de Prendido/Apagado/Modo en sentido horario hasta que se pare. Así se puede extender la duración de las pilas.

Nunca conecte aparatos que emiten calor al Select Switch.

Localización y Solución de Problemas

Si el equipo le falla y no funciona después de que usted haya seguido las instrucciones de instalación, use las sugerencias de localizar y solucionar los problemas que hemos listado más abajo. Si el problema continúa, llame al Soporte Técnico de APH a 1-800-223-1839 (EEUU) o a 1-502-895-2405.

1. Mueva el interruptor de Polaridad al otro lado.
2. Revise todas las conexiones del enchufe mono y otras conexiones de recepción para asegurar que estén bien conectados.
3. Asegure de que el interruptor de PRENDER/APAGAR del aparato Esté PRENDIDO. Si el aparato tiene un interruptor que es sensible a la presión, oprímele con cinta para que esté PRENDIDO.
4. Revise si la perilla del temporizador y la perilla de modo demuestran la cantidad de tiempo que usted quiere, y el tipo de control.

Si usted ha conectado un aparato y no se prende, intente lo siguiente:

1. Revise el interruptor por conectarlo a otro aparato o juguete que se impulsa por pilas.
2. Revise el aparato por enchufarlo en otro interruptor.

Placa de Adaptador

El Select Switch contiene una chapa de adaptador que es lisa para los que no les gusta la placa desnivelada. Solo sujete la placa lisa sobre la placa táctil. Para quitarla, agarre los bordes de la placa lisa con una mano, gírela un poco y levántela a la vez. Muchas opciones táctiles se pueden adherir a la placa lisa utilizando material para enganchar y enrollar u otros adhesivos temporarios o permanentes.

Seguridad

1. Lea las instrucciones para cada aparato, juguete, y dispositivo antes de usarlos con el Select Switch.
2. Cuando se pone cualquier aparato cerca de un usuario, hágalo con cuidado (especialmente los aparatos que tengan partes que se mueven).
3. Mantenga el Select Switch y todos los aparatos lejos del agua y humedad.
4. No abra el Select Switch para exponer sus partes interiores.
5. Para prevenir heridas, siempre desconecte el aparato de la conexión de recepción antes de abrir la tapa de un aparato que se impulsa con pilas y que tienen partes que se mueven.

6. Mantenga el piso limpio de hilos y cuerdas para evitar que la gente no se tropiece, y para prevenir que el Select Switch u otro aparato conectado se jale al piso. Posicione todas las cuerdas cerca de la pared y lejos de pasillos y niños.

Almacenaje y Cuidado

1. Si se requiere una limpieza, primero desconecte el Select Switch del aparato. Utilice un trapo húmedo para limpiar el exterior.
2. Nunca levante el Select Switch por la cuerda del enchufe mono. Cuando se almacena o cuando se empaca para transportarlo, use la caja original de envío o acolche el interruptor para protegerlo.
3. Siempre desconecte todos los interruptores cuando no se ocupan; sin embargo, el Select Switch se puede dejar conectado a un aparato que se ocupa con frecuencia para la comodidad del usuario.

Garantía

APH ofrece una garantía de un año en el Select Switch. Para mayor información visite aph.org.

APH ofrece una garantía de devolución de dinero de 60 días si nuestros productos no cumplen con sus necesidades o expectativas. Los productos deben estar en condiciones nuevas para honrar este servicio. Siga nuestra política de cambios/devoluciones cuando devuelva productos bajo nuestra garantía. Visite aph.org para obtener más información.

Procedimiento de reemplazo o reparación

Llame al servicio al cliente de APH para más detalles.



**AMERICAN
PRINTING
HOUSE**

**1839 Frankfort Avenue
Louisville, Kentucky 40206
502-895-2405 • 800-223-1839
aph.org • info@aph.org**

Select Switch 1-08617-00